

PANAT LAPTOOL®
Jutta Graab-Ehlig

Im alten Rathaus
Am Roßtor 1 • 41849 Wassenberg

Tel 02432 907805

Fax 02432 907966

Mail vertrieb@panat-laptool.de

panat-laptool.de


Reinigungsempfehlung
für Ihre Produkte von
PANAT LAPTOOL®

Sehr geehrter Kunde,

Unsere Produkte liegen uns sehr am Herzen. Sie sind nicht nur maschinell gefertigt, oft besteht ein großer Teil aus (eigener) Handarbeit. Jedes Teil ist dadurch ein Einzelstück und kann sich von den anderen unterscheiden. Wir geben uns große Mühe, die Qualität zu überwachen und zu kontrollieren. Sollte Ihnen dennoch etwas auffallen, was die Funktion maßgeblich einschränkt, melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns über Anregungen!

WICHTIGER HINWEIS

Vor der Benutzung der Geräte sollten die Patienten dringend ihre Hände desinfizieren. Dies bietet den größten Schutz vor der Verbreitung von Keimen.

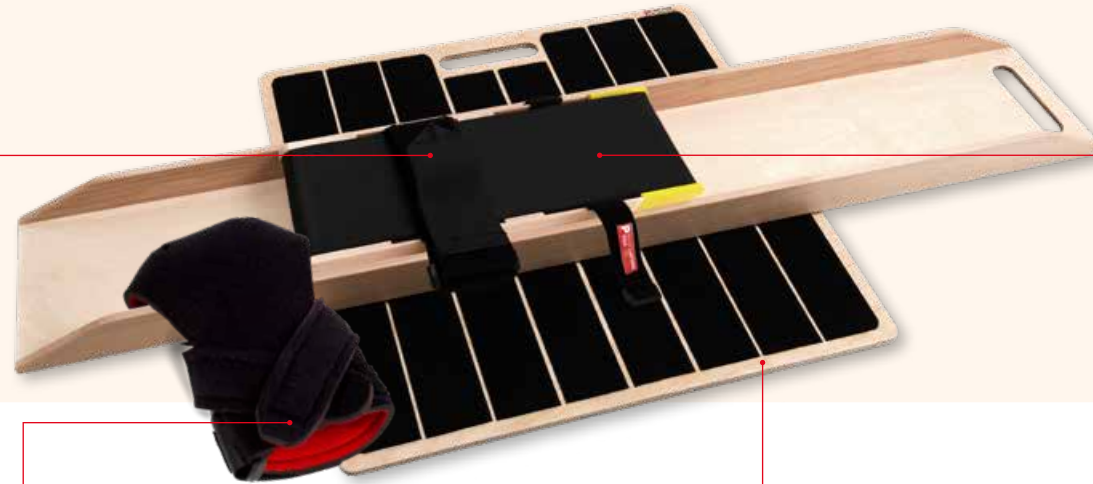

KLETTVERSCHLÜSSE

Schnellreinigung: Drücken Sie ein starkes Klebeband mit der Klebeseite auf den Klettverschluss und ziehen Sie ihn wieder ab. Mehrere Male wiederholen, bis der Klettverschluss sauber ist.

Gründliche Reinigung: Mit einer kleinen Drahtbürste Schmutz und Fussel aus dem Klett entfernen. Feine Härchen entfernen Sie mit Hilfe einer Nadel.



waschen



bleichen



bügeln



chemisch
reinigen

Reinigung nur in geschlossenem Zustand.

NEOPREN

Maschinenwäsche: Schonwaschgang oder Wolle-Programm bei maximal 40°C, nicht schleudern. In die Waschmaschine noch etwas Desinfektionsspüler geben oder mit Desinfektionswaschmittel waschen.

Bei verbogenen Häkchen fahren Sie mit einem geraden Messer mehrere Male gegen den Strich über die Häkchen, dadurch richten sie sich wieder auf.

LACKIERTE HOLZFLÄCHEN

Die Fläche mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Produktempfehlung: mikrozid® universal wipes von der Firma Schuelke.

KLETT UND ZELLKAUTSCHUK

Klettband oder Zellkautschuk mit einem alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel einsprühen. Stellen Sie sicher dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. **Vor Benutzung auf vollständige Abtrocknung achten!** Die schwarzen Softgriffe können durch Lösen der Schrauben entfernt werden und sterilisiert oder in der Spülmaschine gewaschen werden. Produktempfehlung: Antifect®N liquid von der Firma Schuelke.